


ANLEITUNG GURGELTEST

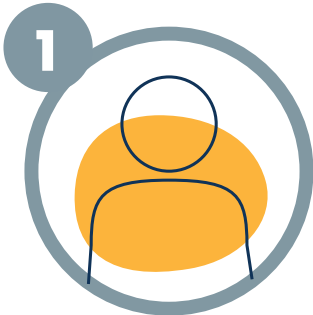

1. Account erstellen

Erstellen Sie Ihren persönlichen Account und fügen Sie – falls gewünscht – auch Familienmitglieder oder Freunde hinzu. Bitte bringen Sie zur Abholung der Tests Ihr Smartphone mit.

Die Accounts können auch verknüpft werden. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Accounteinstellungen.



Anmeldung:
QR-Code scannen
oder unter:
my.novatium.at



2. Test abholen & bestätigen

In der Partner-Filiale weisen Sie dem Personal Ihre Abhol-Bestätigung am Smartphone vor. Bestätigen Sie Ihre Abholung.

Test-Kits dürfen nur bei Anzeige der Bestätigung ausgegeben werden.

Partner-Filialen:



Baguette
So frisch. So fröhlich.



3. Gurgeln & scannen


Führen Sie die folgenden 6 Schritte aus:



1 30 Minuten vor Probenabgabe, Mund mit Wasser ausspülen. Im Anschluss nichts essen oder trinken.



2 Fülle das Röhrchen bis zur Hälfte mit Wasser und gurgle mit diesem Wasser für 30 Sekunden.

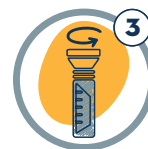


3 Den beiliegenden Trichter auf das Röhrchen schrauben.



4 Spucke die gesamte Flüssigkeit zurück in das Röhrchen. Den Trichter entsorgen und Probe gut verschließen.



5 Klebe den beigelegten QR Code auf die Seite des Röhrchens & scanne diesen mit „Test einlösen“ in deinem Novatium-Account ein.

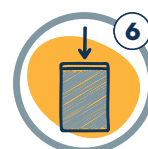

6 Gib nun das Röhrchen in den Rückgabebeutel und verschließe diesen sorgfältig.



4. Gurgeltest abgeben

Geben Sie Ihren Test zur Auswertung bei einer Rückgabestation in einer Partner-Filiale ab.

Die Testungen werden im Laufe des Tages in das Labor geliefert und dort ausgewertet.



5. PCR-Testergebnis erhalten

Die Laborergebnisse werden Ihnen nach erfolgreicher Durchführung per E-Mail übermittelt. Sie können diese natürlich auch jederzeit in Ihrem Account einsehen.

Damit Ihre Daten geschützt bleiben, übermitteln wir Ihnen ausschließlich den Link zum Testzertifikat (Grüner Pass) sowie Vor- und Nachname der getesteten Person.